




ACTIVE *Erection System*^{NT}[®]

Vakuum – Erektionshilfe bei erektiler Dysfunktion

Häufige Ursachen von Erektionsstörungen sind:

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- Erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- Neurologische Krankheiten (Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, Blutfettensener, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und Alkoholmissbrauch


Das **ACTIVE Erection System**^{NT}[®] ist eine Alternative zur medikamentösen Behandlung.

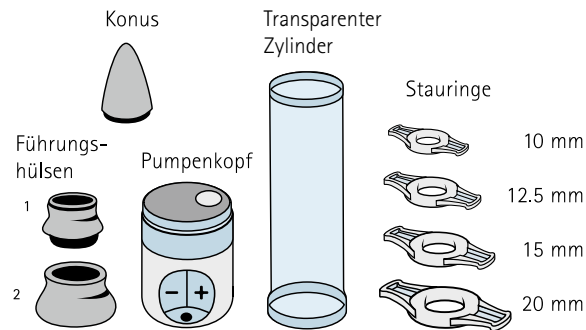

Das **ACTIVE Erection System**^{NT}[®] besteht aus:

- Transparenter Zylinder
- Elektrischer Vakuumpumpe mit drei AAA-Batterien
- Führungshülse 1 und 2
- Konus
- vier verschiedenen Stauringen (Innendurchmesser 10; 12,5; 15 und 20 mm)
- Sylk-Gleitmittel 50 ml Flasche
- Gebrauchsanweisung
- DVD mit der Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung

Pos. Nr. 99.27.02.0017
Apotheken PZN 841388 8
EAN: 4013273000116
Art.-Nr. AES 01
Made in Germany.

 0483 Medizinprodukt



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
www.medintim.de

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de



AESNT 13485:2011_01



ACTIVE *Erection System*^{NT}[®]

Vakuum – Erektionshilfe bei erektiler Dysfunktion



ACTIVE *Erection System*^{NT}®

Vakuum – Erektionshilfe bei
erektiler Dysfunktion

Anwendung

Das **ACTIVE *Erection System*^{NT}**® ist ein medizinisches Hilfsmittel, um eine Erektion zu erlangen.

Die Vakuumpumpe bewirkt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis. Hierdurch füllen sich die Schwellkörper mit Blut und führen zu einer Versteifung des Gliedes. Nun wird einer der Stauringe über den Penisschaft gestreift. Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders den Rückfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler und befriedigender Geschlechtsverkehr möglich.

Alle Teile können in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden.



Eigenschaften

Das **ACTIVE *Erection System*^{NT}**® lässt sich leicht mit warmem Wasser reinigen (außer dem Pumpenkopf). Alle Teile, auch die Stauringe in verschiedenen Größen, können auch nach Jahren noch nachbestellt werden.

Es besteht 2 Jahre Garantie auf den Pumpenkopf (Motor).

Das **ACTIVE *Erection System*^{NT}**® ist ein von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel und kann vom Arzt verordnet werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

Weiter Informationen finden Sie unter:
www.active-erection-system.de