



DilatorSet

zur Vaginaldehnung

Inhalt:

– 6 Dehnungshilfen aus Silikon

Farbe	Durchmesser	Länge
Gelb	11 mm / 0,46 inch	60 mm / 2,36 inch
Rot	16 mm / 0,65 inch	70 mm / 2,76 inch
Blau	19 mm / 0,76 inch	85 mm / 3,35 inch
Violett	23 mm / 0,89 inch	105 mm / 4,13 inch
Altrosa	30 mm / 1,17 inch	125 mm / 4,92 inch
Graublau	50 mm / 1,99 inch	145 mm / 5,71 inch

– Gleitmittel SYLK (wasserlöslich)

– Tasche (Polyester)

Material:

Dehnungshilfen: Silikon

PZN 9013412

EAN 401327300079 6

Art. Nr.: MED DIL SET

Pflegehinweis:

Bitte stets sicherstellen, dass die Dehnungshilfen trocken sind, bevor diese in die Aufbewahrungstasche zurückgelegt werden.

Bei Infektionen und/oder zur Reinigung kann das Dilator Set in kochendem Wasser ausgekocht werden.



Medizinprodukt

Erhältlich in allen Apotheken (PZN 9013412),
online www.medintim-shop.de oder direkt.



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH
Kelsterbacher Strasse 28
D-64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20
Fax +49 (0) 6105 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de



Neu

DilatorSet

Medizinische Dehnungsstifte aus
Silikon zur Anwendung
bei Dehnungsübungen.



DilatorSet zur Vaginaldehnung

Anwendungsgebiete:
Bei Vaginalbeschwerden und
Problemen beim penetrativen
Geschlechtsverkehr aufgrund von

- **Vaginismus** (Verkrampfung)
- **Dyspareunie**
(Schmerzen beim Geschlechtsverkehr)
- Infolge einer gynäkologischen
Operation
- nach einer **Geburt**

Anwendungshinweise:

Mit der kleinsten Größe beginnend wird die Dehnungshilfe in die Vagina eingeführt und verbleibt dort mehrere Minuten. Wenn eine Größe beschwerdefrei eingeführt werden kann, empfehlen wir direkt im Anschluss zur nächsten Größe überzugehen, da die Scheidenmuskeln dann bereits entspannt sind. Die Anwendungen können im Liegen oder im Stehen, mit einem Bein auf einen Stuhl hochgestellt, erfolgen.

Wenn vom Arzt nicht anders empfohlen, sollten die Übungen täglich wiederholt werden. Atmen Sie ruhig und führen Sie die Dehnungshilfe sanft in die Scheide ein, und zwar so weit, wie dies beschwerdefrei möglich ist. Lassen Sie die Dehnungshilfe jeweils mehrere Minuten in der Scheide bzw. im Scheideneingang liegen. Es kann sein, dass Sie bei



den ersten Anwendungen der Dehnungshilfe lediglich die Spitze einführen können, dies ist völlig normal. Es gibt keine zeitliche Begrenzung für die Anwendungsdauer der Dehnungshilfen.

Wenn das Einführen der größten Dehnungshilfe beschwerdefrei ist, kann penetrativer Geschlechtsverkehr versucht werden.